

【产品名称】

一次性使用病毒采样管

【备案号】

苏苏械备 20200086 号

【货号】

43903

【规格与包装】

1 人份：5mL 保存管 1 支（内含 2mL 保存液）、采样拭子 1 支、生物安全袋 1 个

【用途】

用于病毒 DNA/RNA 样本的收集、运输和储存等。该产品适用于采样后咽拭子、鼻拭子或特定部位组织样本的保存，储存的样本可用于后续的核酸提取或纯化等临床实验。

【储存条件及有效期】

产品使用前可在 15-30℃ 下保存 24 个月。

产品使用后，可在常温下保存样本 1 周，如需更长时间保存，请置于 -80℃。

【使用方法】

1. 采样前，在采样管的标签上标注相关样品信息。
2. 根据不同的采样要求，用采样拭子在相应的目标部位采样。
3. 迅速将采样后的拭子浸入管内无菌采样液中。
4. 将拭子高出采样管的部分折断，旋紧管盖，摇动数次。
5. 将采样管置于生物安全袋内，密封转运。

注：具体采样方法有以下几种：

- a) 鼻拭子：将拭子头轻轻插入鼻腔内鼻腭处，停留片刻后缓慢转动退出。以另一拭子拭另侧鼻孔，将拭子头浸入采样液中，尾部弃去。（适合用本产品采样）
- b) 咽拭子：用拭子擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁，同样将拭子头浸入采样液中，尾部弃去。（适合用本产品采样）

【注意事项】

1. 请您严格按照说明书使用本品
2. 使用前观察采集管是否有液体渗漏，若有，请勿使用并丢弃。

【联系信息】

企业名称：苏州海狸生物医学工程有限公司

地址：苏州工业园区华云路 1 号 东坊产业园 B 区 4 号楼

联系电话：0512-85187639

邮政编码：215123

网址：www.beaverbio.com

有限使用商标许可

苏州海狸生物医学工程有限公司声明对其开发的或者与其他单位合作开发的所有内容和服务拥有或者与合作者共同拥有全部知识产权，受有关商标权、专利、版权等知识产权法律的保护。本产品的购买者享有的权利仅限于对所购买数量的本产品进行内部研究使用，并且该权利不可转让，亦不可用于任何商业应用，购买者无权对该产品或其任何一部分进行重新销售。如出于商业用途的使用（包括但不限于代理销售），则必须经过苏州海狸生物医学工程有限公司的书面许可，并在使用时注明来源和知识产权、版权等系苏州海狸生物医学工程有限公司所有的标记。如需获得其它权限信息，请联系 Beaver@beaverbio.com，或者苏州海狸生物医学工程有限公司地址：苏州工业园区华云路 1 号 东坊产业园 B 区 4 号楼，邮编 215123。

本产品由苏州海狸生物医学工程有限公司生产。

版权声明：

©2013 苏州海狸生物医学工程有限公司保留所有权利。本《用户手册》所呈现的任何内容，无论商标、设计、文字、图像和任何其他信息，未经特殊说明，其著作权均属苏州海狸生物医学工程有限公司所有。对于违反国家有关法律法规，不尊重本声明，不经同意，擅自使用本《用户手册》内容并不注明出处的行为，本公司保留采取法律措施，追究其责任的权力。

需要支持，请访问：www.beaverbio.com/support 或电子邮件：Service@beaverbio.com