

【产品名称】 一次性使用病毒采样管(货号: 43903)

【规格与包装】

一次性使用病毒采样管	#43903
	每套包含: 1、保存管 1 支(内含 1-3mL 保存液); 2、采样拭子 1 支 3、生物安全袋

【用途】 该产品适用于样本的收集、运输与和保存等。

【储存条件及有效期】

产品使用前, 可在 15-30℃ 下保存 24 个月。

产品使用后, 可在常温下保存样本 1 周, 如需更长时间保存, 请置于 -20℃ 及以下。

【使用方法】

1. 取出拭子, 按照规范在目标部位采样。
2. 迅速将采样后的拭子头浸入保存液中。
3. 拭子折断处折断拭子杆, 尾部弃去, 旋紧管盖并封闭。
4. 在保存管上标注样品信息, 装入密封袋内, 按照规范转运。

注: 具体采样方法有以下几种:

1) 鼻拭子:

1.1 将拭子自鼻孔垂直面部方向插入, 深入距离最少应达耳垂部位到鼻尖长度的一半。遇到阻力后即到达后鼻咽, 应停留数秒吸取分泌物(一般要求 15~30s), 应旋转拭子 3~5 次。

1.2 宜轻轻旋转取出拭子, 将拭子头浸入保存管的采样液中。

1.3 从折断点处折断拭子杆, 尾部弃去, 旋紧管盖并封闭。

2) 咽拭子:

2.1 拭子越过舌根到咽后壁及扁桃体隐窝、侧壁等处。

2.2 先用拭子适度用力来回擦拭双侧咽扁桃体至少 3 次, 然后再咽后壁 3~5 次为宜。

2.3 取出拭子(避免触及舌头、悬垂体、口腔粘膜和唾液), 将拭子头浸入保存管的采样液中。

2.4 从折断点处折断拭子杆, 尾部弃去, 旋紧管盖并封闭。

【注意事项】

1. 请您严格按照说明书使用本品
2. 使用前观察采集管是否有液体渗漏, 若有, 请勿使用并丢弃。

【制造商信息】

【备案人/生产企业】 苏州海狸生物医学工程有限公司

【住所】 苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 B 区 4 号楼

【邮编】 215000

【联系方式】 电话: 0512-85187639 传真: 0512-85187635

【医疗器械备案凭证编号】 苏苏械备 20200086 号

【医疗器械生产备案凭证编号】 苏苏食药监械生产备 20161010 号

【医疗器械产品技术要求编号】 苏苏械备 20200086 号

【说明书编制日期】 2020.02.10

有限使用商标许可

苏州海狸生物医学工程有限公司声明对其开发的或者与其他单位合作开发的所有内容和服务拥有或者与合作者共同拥有全部知识产权, 受有关商标权、专利、版权等知识产权法律的保护。本产品的购买者享有的权利仅限于对所购买数量的本产品进行内部研究使用, 并且该权利不可转让, 亦不可用于任何商业应用, 购买者无权对该产品或其任何一部分进行重新销售。如出于商业用途的使用(包括但不限于代理销售), 则必须经过苏州海狸生物医学工程有限公司的书面许可, 并在使用时注明来源和知识产权、版权等系苏州海狸生物医学工程有限公司所有的标记。如需获得其它权限信息, 请联系 Beaver@beaverbio.com, 或者苏州海狸生物医学工程有限公司地址: 苏州工业园区华云路 1 号桑田岛科创园 B 区 4 号楼, 邮编 215123。

本产品由苏州海狸生物医学工程有限公司生产。

版权声明:

©2013 苏州海狸生物医学工程有限公司保留所有权利。本《用户手册》所呈现的任何内容, 无论商标、设计、文字、图像和任何其他信息, 未经特殊说明, 其著作权均属苏州海狸生物医学工程有限公司所有。对于违反国家有关法律法规, 不尊重本声明, 不经同意, 擅自使用本《用户手册》内容并不注明出处的行为, 本公司保留采取法律措施, 追究其责任的权利。

需要支持, 请访问: www.beaverbio.com/support 或电子邮件: Service@beaverbio.com